


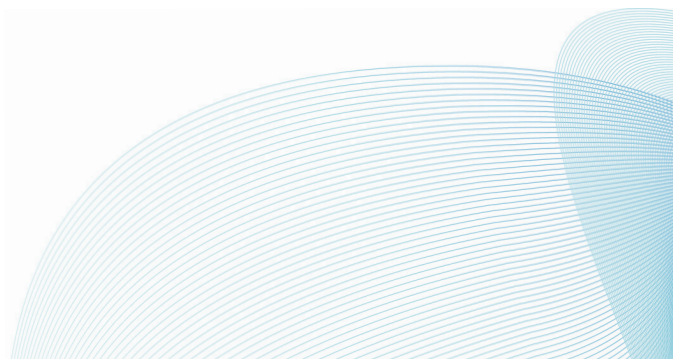

Handleiding schoenen oprekmachine

Voor gebruik met het Formthotics verhittingsapparaat V20-100/V20-200



BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES VOOR GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN IN DEZE HANDLEIDING EN OP HET APPARAAT.

Als u met een elektrisch apparaat van dit product gebruik maakt moet u te allen tijde de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

WAARSCHUWING

- 1 Gebruik de schoenen oprekkers uitsluitend in combinatie met het Formthotics verhittingsapparaat V20. Dit product is niet compatibel met enig ander product.
 - 2 De schoenen oprekkers zijn heet tijdens gebruik en nog geruime tijd na gebruik. Om brandwonden te voorkomen, nooit met de blote huid aanraken.
 - 3 Lees alle waarschuwingen en aanwijzingen voor gebruik die bij het Formthotics verhittingsapparaat V20 zijn geleverd alvorens het product in gebruik te nemen.
 - 4 Bedien het Formthotics verhittingsapparaat V20 met de schoenen oprekkers uitsluitend op een stevig en vlak oppervlak.
-

OVER HET VERHITTINGSAPPARAAT

De schoenen oprekkers voor het Formthotics verhittingsapparaat V20 zijn vormgegeven volgens de hoogste standaarden voor kwaliteit en functionaliteit.

Ze zijn speciaal ontworpen voor gebruik bij skischoenen, snowboardschoenen of andere soorten volledig afgesloten schoenen.

Wanneer deze gebruikt worden in combinatie met het Formthotics verhittingsapparaat V20, verhit deze geleidelijk alle Formthotics orthesen tot de optimale temperatuur voor het vormgeven op maat. Het apparaat heeft maar één stand en is zeer gemakkelijk in het gebruik.

GEBRUIK


Strap 1

Maak de sluitsystemen op de schoen los. Verwijder alle aanwezige binnenzolen en doe de Formthotics in de schoenen.

Leg een schoenen oprekker in één van de schoenen in de aangegeven richting tot het uiteinde van de schoenen oprekker de Formthotic raakt. Trek de schoenen oprekker vervolgens circa 1 cm terug.


Zet het sluitsysteem van de schoen weer vast rondom de schoenen oprekker.

Herhaal met de volgende schoen.

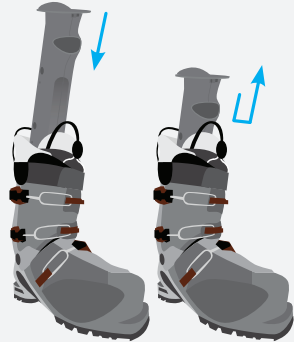

Strap 2

Pas de schoen en de schoenen oprekker op de aansluiting van het Formthotics verwittingsapparaat V20 aan zoals aangegeven. Het gewicht van de schoen zorgt ervoor dat de schoenen oprekker goed op de aansluiting past.

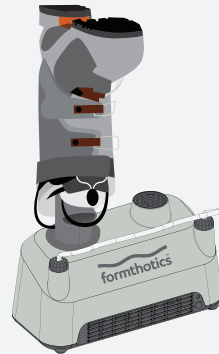

Strap 3

Druk op Start. Het LED lampje verandert van groen naar blauw om aan te geven dat het verwittingsproces gestart is. Na 3 minuten zal het LED lampje groen knipperen en is er een zoemtoon te horen. Druk tweemaal op Start om het verwittingsproces opnieuw te starten.

Laat de machine niet onbeheerd achter terwijl deze in gebruik is.

Strap 4

Verwijder de schoenen en maak het sluitsysteem los om de schoenen oprekker te kunnen verwijderen.

Pas op: de aansluiting op het apparaat en het deel van de schoenen oprekker dat in het verwittingsapparaat heeft gezeten, zijn heet. Verwijder de schoenenoprekker door middel van de onderkant van de oprekker onder de aansluiting.

Pas de schoenen onmiddellijk bij de cliënt aan en laat hen ongeveer 2-3 minuten in de schoenen staan.

De Formthotics modelleren zich naar de vormen van de voet en de schoen. Zet het apparaat uit.

Dit apparaat is alleen bestemd voor het verhitten van Formthotics producten. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden of voor andere merken orthesen of binnenzolen.

GARANTIE & ONDERHOUD

Foot Science International geeft garantie voor dit product bij defecten door gebrekkig materiaal of vakmanschap voor een periode van twee jaar vanaf de dag van aankoop. De garantie geldt niet bij schade door verkeerd gebruik. Wanneer het product defect raakt gedurende deze periode van twee jaar zullen wij het repareren of vervangen zonder bijkomstige kosten. Het is niet toegestaan dit product zelf te repareren, breng het product daarom terug naar de plaats van aankoop voor onderhoud.

Verwijdering: u kunt het product aan het einde van haar nuttige leven recyclen of voor ontmanteling retourneren aan Foot Science International.



Foot Science International Ltd
26 Dakota Crescent, Sockburn,
Christchurch 8042, New Zealand

Phone **+64 3 348 2115**

Email **info@formthotics.com**

Besøg **formthotics.com**