


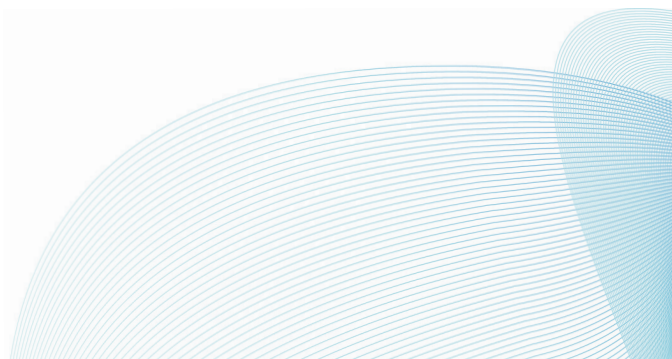

ブーツエクステンダー 操作説明書

Formthotics Heating Machine V20-100 / V20-200を安全にご利用いただくために



安全に関する重要な注意事項

本製品をご利用いただく前に、この製品取扱書および電化製品に記載されたすべての指示および注意事項をお読みください。

この付属品を指定電化製品でご利用になる場合は、以下の事項を含む、基本的な使用上の注意を常に守ってご使用ください。

注意事項

- 1 これらのブーツエクステンダーは、Formthotics Heating Machine V20との組み合わせでのみご利用ください。この製品を、他の電化製品でご利用になることはできません。
- 2 ブーツエクステンダーは、使用中および使用後しばらくは高温になります。火傷を防ぐため、熱くなった表面に素肌が触れないようにしてください。
- 3 Formthotics Heating Machine V20にこの製品を取り付ける前に、Formthotics Heating Machine V20に関するすべての警告と操作手順をお読みください。
- 4 ブーツエクステンダーを取り付けたFormthotics Heating Machine V20は、安定した水平な場所で操作してください。

加熱器について

Formthotics Heating Machine V20のブーツエクステンダーは、最高水準の品質と機能を備えるよう設計されています。

これは、スキーブーツ、スノーボードブーツ、または他の完全に密閉された靴で利用できるよう、特設計されたものです。Formthotics Heating Machine V20との組み合わせで利用することにより、Formthotics装置を、足や靴の形状に合わせて成形するために最適な温度まで緩やかに加熱することができます。ご使用に際する設定は1つだけなので、とても使いやすい製品です。

操作手順


手順1

靴の締め具（ファスナーなど）を緩めます。既存のインソールをすべて取り外し、Formthoticsを靴に挿入します。

ブーツエクステンダーの端がFormthoticに触れるまで、ブーツエクステンダーを指示された向きで片方の靴に挿入します。その後、ブーツエクステンダーを約1cm引き戻します。


ブーツエクステンダーの周りの靴の締め具（ファスナーなど）を締めます。

もう片方の靴に同様の操作を繰り返します。

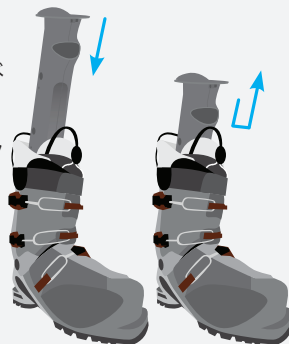

手順2

図に示すように、Formthotics Heat Machine V20の差込口に、靴とブーツエクステンダーを取り付けます。靴の重量により、ブーツエクステンダーにしっかりと装着されます。

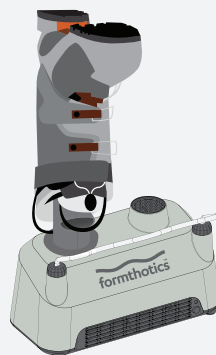

手順3

スタートボタンを押します。LEDインジケータが緑から青に変わり、加熱サイクルが開始されたことを示します。3分後、LEDインジケータが緑色に点滅し始め、ブザーが鳴ります。加熱サイクルの再開は、ボタンを2回押してください。

操作中の機械を放置しないでください。

手順4

靴を機械から取り外し、締め具（ファスナーなど）を緩めて、ブーツエクステンダーを取り外します。

注：排気口と挿入されたブーツエクステンダーの挿入先端部は高温になります。機械の下のエクステンダーの底部を持って、ブーツエクステンダーを取り外してください。

Formthoticsを足と靴の形状に合わせて成形するために、操作後すぐに顧客に靴を装着して、そのまま2～3分立っていただいでください。電源スイッチをオフにします。この機械は、Formthotics製品の加熱専用です。機械を他の目的に使用したり、他のブランドの装具やインソールに使用しないでください。

手順

Foot Science Internationalは、欠陥のある素材または製造過程における欠陥によって、製品に欠陥が生じないことを、購入から2年間保証します。誤用による損傷は、この保証に含まれません。この期間中に製品に欠陥が生じた場合は、無料で修理または交換いたします。この製品をユーザーが修理することはできません。弊社製品取扱店舗にお持ちください。

廃棄: Foot Science Internationalでは、耐用年数が過ぎた本製品の解体またはリサイクルを承っておりますので、弊社までご返却ください。



Foot Science
International

Foot Science International Ltd
26 Dakota Crescent, Sockburn,
Christchurch 8042, Nuova Zelanda

電話 +64 3 348 2115

Eメール info@formthotics.com

Visit formthotics.com